

Selbst-sterilisierende Funktion der Easy Start:
Die selbst-sterilisierende Funktion der Easy Start tötet effektiv und effizient Bakterien und Keime ab, die häufig im Haushalt vorkommen. Diese Selbststerilisation ist vollkommen ausreichend und sicher. Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, befolgen Sie bitte alle Anweisungen sorgfältig und verwenden Sie die Funktion nur wie angegeben. Diese praktische und zeitsparende Funktion lässt sich in 3 einfachen Schritten nutzen. Reinigen Sie alle Einzelteile der Flasche sorgfältig, bevor Sie mit diesen Schritten beginnen!

Schritt 1: Gereinigte Einzelteile der Flasche wie folgt zusammensetzen: Bodenteil mit Silikonventil, Sauger mit Schraubring, Flaschenkörper und Schutzkappe.

Schritt 2: 20 ml kaltes Wasser in den Bodenteil mit Silikonventil füllen. Die Schutzkappe kann dabei als Messbecher verwendet werden.

Schritt 3:
• Schraubring mit Sauger in den Flaschenboden einsetzen.
• Flaschenkörper daraufstellen (ggf. leicht einschrauben, um Verschütten von heißem Wasser beim Herausnehmen aus der Mikrowelle zu vermeiden).
• Schutzkappe darauflegen.

Sterilisation in der Mikrowelle:
• Die benötigte Zeit variiert entsprechend der Flaschenanzahl. Beachten Sie daher bitte die unten aufgeführte Tabelle. Stellen Sie die Mikrowelle auf eine Leistungsstufe von 500 bis 1000 Watt ein.

Anzahl der Flaschen, die gleichzeitig sterilisiert werden sollen	1	2	3	4	5	6
Dauer der Sterilisation (Min.)	3	4	5	6	7	8

• Lassen Sie die Flasche vor dem Herausnehmen aus der Mikrowelle abkühlen. Empfohlene Abkühlzeit: 10 Minuten bei geöffneter Mikrowellentür.

Nach Abschluss der Selbststerilisation in der Mikrowelle bleibt die Easy Start Flasche bis zu **48 Stunden** lang desinfiziert. Vorausgesetzt ist, dass sie wie in Schritt 3 gezeigt zusammengesetzt bleibt.

• Zur sofortigen Verwendung: Schütten Sie Restwasser aus dem Boden aus. Lassen Sie die Einzelteile trocknen.
• Bewahren Sie die Flasche immer im zusammengesetzten Zustand auf.

Weitere Hinweise:
• Folgen Sie den Anweisungen in der Bedienungsanleitung Ihrer Mikrowelle oder Ihres Multifunktionsgeräts.
• **Stellen Sie sicher, dass alle Bestandteile der selbst-sterilisierenden Flasche und der Mikrowelle (einschließlich Wellenleiter-Abdeckung und Drehteller) VOLLKOMMEN sauber und frei von Schmutz, Speiseresten, Fett oder Ölspritzern sind. Ist dies nicht der Fall, kann dadurch das Produkt schmelzen. Zudem können Funken in der Mikrowelle entstehen oder die Wellenleiter-Abdeckung könnte Feuer fangen!**
• Stellen Sie die selbst-sterilisierende Flasche nur auf einem festen und ebenen Untergrund ab.
• Stellen Sie die selbst-sterilisierende Flasche nicht in die Mitte des Drehtellers, da dies zu einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung führen kann.
• Lassen Sie die Mikrowelle während des Sterilisationsprozesses nicht unbeaufsichtigt.

1 Zusammenbau des Bodenteils mit Silikonventil, Sauger mit Schraubring, Flaschenkörper und Schutzkappe.

2 20 ml kaltes Wasser in den Bodenteil mit Silikonventil füllen. Die Schutzkappe kann dabei als Messbecher verwendet werden.

3 Die Flasche in die Mikrowelle stellen.

94% Saugerakzeptanz

Die ovale Form des MAM Saugers orientiert sich an der Form der Brustwarze während des Stillens. Wenn das Baby eine Trinkpause macht, ist kurz die ovale Form der Brustwarze zu sehen, bevor sie wieder ihre ursprüngliche Form einnimmt.
*Marktstudie 2009–2017, mit 1.508 Babys getestet.

MAM Sauger Größe 0 mit besonders kleinem Mundstück und kleiner Öffnung – ideal für Muttermilch

MAM SAUGER mit SkinSoft Silikonoberfläche

- Von Babys instinktiv akzeptiert – für ein vertrautes Gefühl
- Besonders weiche Lippenauflage und kleines Mundstück – ideal für Neugeborene

SAUGERGRÖSSE

SYMMETRISCHE FORM

- Einzigartige, flache Form passt perfekt in Babys Mund
- Stabilisiert den Sauger
- Unterstützt einen gleichmäßigen Trinkfluss

VENTIL

Der MAM Sauger Größe 0 wurde speziell für Neugeborene entwickelt. Die seidig weiche Lippenauflage mit SkinSoft™ Silikonoberfläche und kleinem Mundstück ist perfekt auf Neugeborene abgestimmt.

Der Sauger ist besonders klein, symmetrisch geformt und abgeflacht. Seine Öffnung wurde genau an die dünnflüssige Muttermilch angepasst.

Der MAM Sauger ist in sechs Größen erhältlich:

- 0** Extra-langsam 0 Monate
- 1** Langsam 0+ Monate
- 2** Mittel 2+ Monate
- 3** Schnell 4+ Monate
- Schnell Auslaufsicher** 4+ Monate
- Schnell für dickflüssige Nahrung** 6+ Monate

6. Fehlersuche für die Milchpumpe

Falls das Display nichts anzeigt

- Prüfen Sie, ob der Kippschalter auf „ON“ steht, falls kein Netzadapter angeschlossen ist.
- Falls das Gerät nicht reagiert, schließen Sie das Netzkabel an und prüfen Sie, ob das Display reagiert.
- Vergewissern Sie sich, dass ausreichend Akkuleistung vorhanden ist, falls kein Netzadapter angeschlossen ist. Falls dies nicht der Fall ist, schließen Sie das Gerät zum Laden oder Abpumpen an die Stromversorgung an.

Bei keiner oder nur geringer Saugleistung

- Prüfen Sie, ob alle Anschlussstücke ordnungsgemäß verbunden sind.
- Prüfen Sie, ob das Silikonpolster fest im Trichteraufsatz sitzt.
- Prüfen Sie, ob der Ventilkörper fest mit dem Trichteraufsatz verbunden ist.
- Prüfen Sie, ob die Ventilmembran sicher und flach auf dem Ventilkörper sitzt.
- Prüfen Sie, ob die Membrankappe/die Griffhalterung ordnungsgemäß verbunden ist.
- Vergewissern Sie sich, dass der Schlauch nicht geknickt ist und keine Flüssigkeit enthält.
- Stellen Sie sicher, dass der Brustaufsatz luftdicht mit der Brust abschließt.

Bei Milchrückfluss

- Falls Sie Milch oder Wasser in der Membran oder dem Schlauch sehen, spülen Sie den Schlauch mit heißem, sauberem Wasser aus. Hängen Sie ihn auf und lassen Sie ihn vor dem nächsten Gebrauch an der Luft trocknen.
- Stellen Sie sicher, dass die Membran nicht beschädigt ist.
- Falls „E1“ oder „E2“ auf dem Display erscheint, weist dies auf einen offenen Stromkreis oder einen Kurzschluss im Akku hin. Wenden Sie sich bitte an den MAM Kundendienst.
- Falls „E3“ auf dem Display erscheint, weist dies darauf hin, dass die optimale Betriebstemperatur (von 5 bis 60° C) im Inneren der Pumpeinheit über- oder unterschritten wird. Wenn diese Anzeige erscheint, schalten Sie das Gerät bitte aus. Nach 15 Minuten können Sie die elektrische Milchpumpe wieder verwenden.

7. Umwelt / Entsorgung

Dieses Produkt enthält wiederaufladbare Akkus. Bitte entsorgen Sie das Produkt am Ende der Nutzungsdauer zum Schutz der Umwelt nicht über den Hausmüll. Die Entsorgung sollte bei einer zugelassenen Verwertungsstelle erfolgen. Es wurde ein Lithium-Akku verbaut: Entfernen Sie den Akku NICHT SELBST. Der Akku muss getrennt entsorgt werden. Bitlen Sie die Verwertungsstelle beim Entfernen des Akkus aus dem Gerät um Hilfe.

8. Gewährleistung

Für das Gerät gilt eine zweijährige gesetzliche Gewährleistungspflicht. Diese beginnt mit dem Kaufdatum und gilt, sofern ein Kaufbeleg vorgelegt wird. Dies umfasst keine Schäden, die auf natürlichen Verschleiß, unsachgemäße Verwendung oder unzureichende oder nicht ordnungsgemäße Wartung zurückgehen. Bei sorgfältiger Behandlung gemäß den Vorgaben durch diese Gebrauchsanweisung gibt der Hersteller eine zweijährige Gewährleistung ab Kaufdatum. Das Netzkabel und der elektrische Adapter sind von dieser Gewährleistung ausgeschlossen, soweit die Beanstandung unter den normalen Verschleiß fällt. Achten Sie darauf, einen Kaufbeleg beizufügen, wenn Sie das Gerät einschicken, um den Gewährleistungsanspruch wahrzunehmen.

9. Hinweise zur Reparatur

Falls eine Reparatur erforderlich sein sollte, versuchen Sie unter keinen Umständen, das Gerät zu öffnen. Das Gerät kann nicht geöffnet werden. Schicken Sie das Gerät bei einer Fehlfunktion oder bei fehlerhaftem Netzkabel oder Netzadapter direkt an den MAM Kundendienst ein. **Wichtig:** Im Fall von nicht fachgerecht ausgeführten Reparaturen stellt ein weiteres Verwenden des Geräts ein extrem hohes Sicherheitsrisiko dar.

10. Technische Daten

Netzadapter:
Leistungsaufnahme: 100–240 V; 50–60 Hz /
Leistungsabgabe: 10 V 1,5 A
Nennleistung: 15 W
Lithium-Akku: 1.750 mAh
Pumpfrequenz, Stimulation: 100 Zyklen pro Minute
Saugleistung, Stimulation: -0,002 bis -0,018 MPa
Pumpfrequenz, Abpumpen: 26–60 ZYKLEN PRO MINUTE
Saugleistung, Abpumpen: -0,013 bis -0,036 MPa
Timer: 30 Min.
Betriebsbedingungen: +5 °C bis +40 °C, relative Feuchte ≤ 90 %

11. Sicherheitshinweise

1. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
2. Das Gerät darf nicht von Kindern verwendet werden, da diese die damit verbundenen Gefahren nicht verstehen. Die Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern ausgeführt werden.
3. Dieses Gerät darf von Menschen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten sowie von Menschen mit geringem Maß und Erfahrung oder Wissen verwendet werden, wenn sie dabei beaufsichtigt werden oder in den sicheren Gebrauch des Geräts eingeführt wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
4. Dieses Gerät ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt.

5. Das Produkt darf nur zur bestimmungsgemäßen Verwendung gemäß dieser Gebrauchsanweisung verwendet werden. Es darf kein Zubehör verwendet werden, das nicht vom Hersteller empfohlen wird.
6. Verwenden Sie niemals Netzadapter oder Akkus, die nicht im Lieferumfang der Pumpe enthalten waren.
7. Schließen Sie das Gerät nur an Spannungsversorgungen an, die den Vorgaben auf dem Typenschild des elektrischen Adapters entsprechen.
8. Vergewissern Sie sich vor dem ersten Verwenden des Geräts, dass alle Verpackungsteile und nicht verwendeten Teile entfernt wurden, damit Ihr Kind sich nicht daran verletzen oder solche Teile verschlucken kann.
9. Verwenden Sie das Gerät niemals innerhalb der Reichweite von Kindern. Sichern Sie das Netzkabel und sorgen Sie dafür, dass nicht versehentlich daran gezogen werden kann, damit das Gerät nicht auf den Boden stürzt.
10. Prüfen Sie die Milchpumpe vor jedem Gebrauch. Verwenden Sie sie nur, wenn Gerät und Netzkabel unversehrt sind. Beim ersten Anzeichen von Beschädigung muss das betreffende Teil entsorgt bzw. repariert werden.
11. Ist der Netzadapter oder das Netzkabel beschädigt, muss das Teil vom Hersteller, einem anerkannten Fachbetrieb oder einer gleichwertig qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
12. Das Gerät darf nur von einem autorisierten Fachbetrieb geöffnet werden. Das Öffnen durch nicht autorisierte Personen führt automatisch zum Erlöschen des Gewährleistungsanspruchs. Reparaturen dürfen nur von Fachpersonal ausgeführt werden. Nicht fachgerecht ausgeführte Reparaturen stellen ein ernsthaftes Sicherheitsrisiko für die Anwenderin dar. Dies gilt auch für das Austauschen des Netzkabels.
13. Dieses elektrische Gerät darf nicht in Wasser eingetaucht oder im Geschirrspüler gereinigt werden. Sollte das Gerät versehentlich ins Wasser fallen, greifen Sie nicht danach! Ziehen Sie sofort den Netzstecker.
14. Ziehen Sie zum Reinigen der Pumpeinheit den Netzstecker.
15. Stellen Sie sicher, dass der Schlauch sauber ist und keine Wassertropfen enthält.

16. Stellen Sie die elektrische Pumpeinheit oder den Netzadapter des Geräts niemals in die Mikrowelle. Setzen Sie sie niemals hohen Temperaturen aus.
17. Wird das Gerät längere Zeit nicht verwendet, schalten Sie es mithilfe des Kippschalters aus.
18. Laden Sie den Akku mindestens einmal im Monat. Um die maximale Lebensdauer des Geräts voll auszuschöpfen, sollte die Ladezeit 6 Stunden nicht überschreiten.
19. Ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Netzstecker aus der Steckdose.
20. Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung stets an einem sicheren Ort auf.
21. Das Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten (einschließlich Kindern) sowie von Menschen mit geringem Maß an Erfahrung oder Wissen bestimmt. Davon ausgenommen ist, wenn sie dabei durch eine Person beaufsichtigt werden, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, bzw. sie von dieser in den sicheren Gebrauch des Geräts eingewiesen wurde.
22. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
23. Das Gerät darf ausschließlich in Verbindung mit dem mitgelieferten Netzteil verwendet werden.
24. Dieses Gerät enthält Akkus, die nur von Fachpersonal ausgetauscht werden können.
25. Dieses Gerät enthält nicht austauschbare Akkus.
26. Verwenden Sie zum Laden der Akkus ausschließlich das mitgelieferte abnehmbare Ladegerät.

16

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
MAM Babyartikel GmbH,
Rudolf-Diesel-Straße 6–8, 27383 Scheebel, Deutschland.
DE: Kostenfreie Eltern-Hotline:
0800 – 2229626, E-Mail: info@mam-babyartikel.de
AT: Kostenfreie Eltern-Hotline:
0800 – 900090, E-Mail: kundenservice@mambaby.com

Patente: EP 2396041, DE 50200401437.4, AT 508248, EP 1675546
GGD1D5AD001.AAA

mambaby.com

1

MAM

Inhalt

1. Produktbeschreibung
2. Reinigen und Warten des Geräts
3. Verwenden des Geräts
- 3.1. Elektrisches Abpumpen
- 3.2. Manuelles Abpumpen
- 3.3. Gebrauch in Verbindung mit dem MAM Aufbewahrungsbecher
4. Aufbewahren und Erwärmen von Muttermilch
5. Füttern
- 5.1. MAM Easy Start™ Anti-Colic Flasche
- 5.2. MAM Sauger mit SkinSoft™ Silikonoberfläche
6. Fehlersuche für die Milchpumpe
7. Umwelt / Entsorgung
8. Gewährleistung
9. Hinweise zur Reparatur
10. Technische Daten
11. Sicherheitshinweise

2in1 Milchpumpe

